

尿とりパッドの選び方

紙パンツには、通気性のある『紙パンツ専用パッド』のご使用をおすすめします

ポイント


1

紙パンツ専用パッドを選びましょう

テープ式用尿とりパッドの方が、大きく安心に見えますが、紙パンツ専用パッドをおすすめします。

- 紙パンツの立体ギャザーの中にスッキリおさまり、ヨレ、ズレがないのでモレにくい。
- うす型で、股部分がモコモコせず、動きやすい。


テープ式用

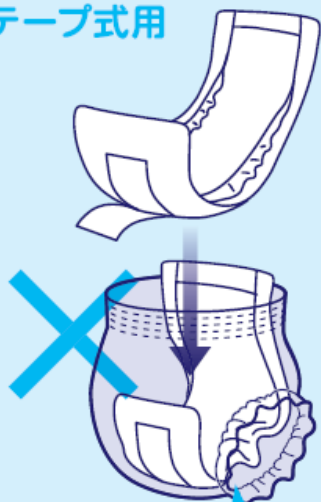

すき間ができて…

モレの原因に!

紙パンツ専用

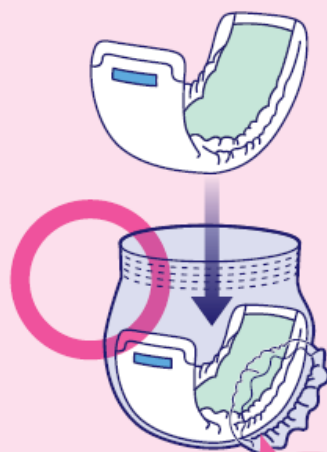

すき間ができずピッタリ

モレにくい!

ポイント

2

通気性のあるおむつを選びましょう

紙パンツと尿とりパッドを使用する場合は、紙パンツも尿とりパッドも、必ず通気性のあるものを選ぶようにしましょう。

肌トラブルの予防になり快適に過ごせます。

尿とりパッドを一緒に使うと…

- ①おむつ交換の負担を軽減できます
- ②おむつ代を減らせます



尿とりパッドの1枚単価は外側のおむつの約半分です。

尿とりパッドの選び方

こまめに交換できる日中と、長時間交換できない夜間は、使い分けを

尿とりパッドを上手に使い分けましょう

尿とりパッドには、複数のタイプがそろっています。

- ・尿量
- ・交換の時間帯(交換の間隔)
- ・昼間／夜間



これらを考慮して、上手に使い分けましょう。その方が、モレたり、皮膚トラブルにならず、快適に過ごせます。その上、交換の負担も軽減できます。


商品パッケージの吸収回数を確認して下さい。



吸収回数



昼用

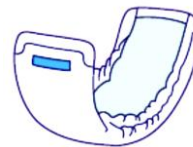


長さ43.5cm×幅13.5cm



リリーフ快適アロマ
安心フィット2回分



夜用

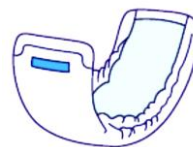

長さ43.5cm×幅15.5cm



リリーフ快適アロマ
安心フィット4回分

夜用(4回分)は、防水シートの中央に★印がついています。


使い方

パンツ専用尿とりパッドのモレない使い方の手順を確認しましょう


1



2

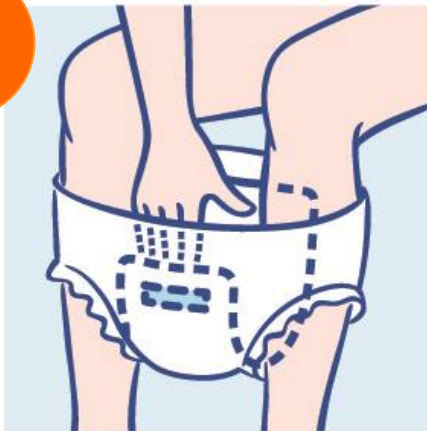

3

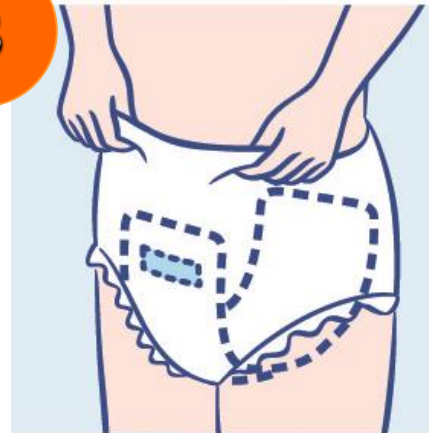

パッドを2つ折りのまま紙パンツの底に付くまで入れます。

- ・青色の前後のテープをはがさずそのままお使いください。
- ・パッドに前後はありません。

パッドを広げて貼り付けます。前後のテープを紙パンツに押しつけるだけ！

- ・紙パンツの立体ギャザーの間におさまるように貼ります。
- ・テープは何度でも付けはがしできます。

紙パンツを上げます。

- ・前後のテープが、直接お肌に当たらないようにご注意ください。

パッドをはずす時は、前後のテープをきちんとはがしてから取りはずしてください。


使用上の注意点

尿とりパッドのモレない使い方のポイントを確認しましょう

ポイント
1

尿とりパッドの立体ギャザーをしっかりと立てましょう

尿とりパッドの両端を軽く引っばって横モレ防止ギャザーを立てましょう！

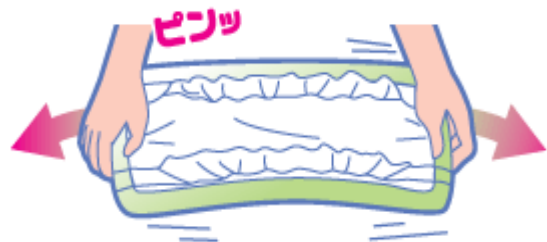


ポイント
2

紙パンツからはみ出さないようにしましょう

尿とりパッドは必ず紙パンツの立体ギャザーの内側に入れましょう！

パンツタイプを
真上から見た図

立体
ギャザー


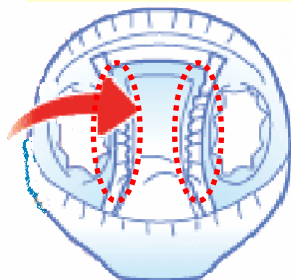


立体ギャザーが防波堤の役目をするので尿とりパッドからあふれた尿をもらしません。

ポイント
3

尿とりパッドは重ねず、1枚で使いましょう

重ねて使うと、すき間ができたり、おむつの立体ギャザーの効果を損なってしまい、モレやすくなります。

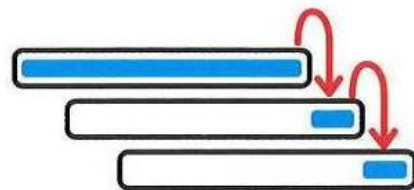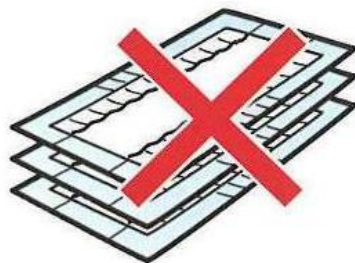

重ねて使うのは
逆効果！

紙おむつの選び方・使い方に関するご相談は

花王・リリーフふれあいダイヤル

(料金は無料です)

0120-062110

受付時間：平日10:00～16:00(土日・祝日を除く)