


使い方


モレ防止のために、ヒップサイズに合ったテープ式おむつを選びましょう。

テープ式おむつのモレない当て方のポイントを確認しましょう

ポイント
1 前(お腹側)と後ろ
(背中側)を確認する

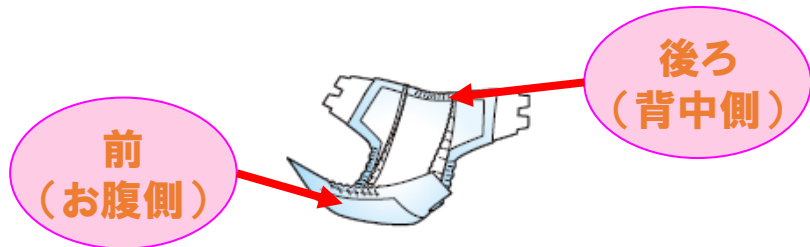


ポイント
2 おむつと体の横位置
背骨の中心におむつの中心を合わせる。
左右のゆがみがないように。

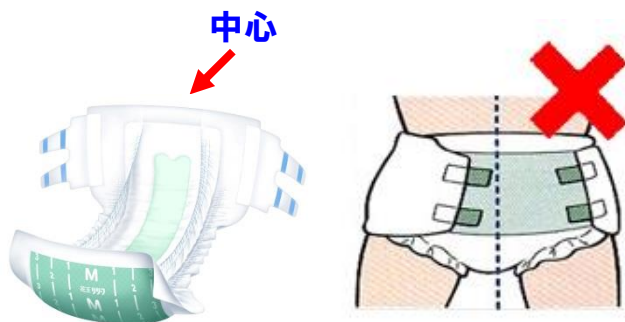

ポイント
3 おむつと体の縦位置
腰骨よりも上に、上のテープが
ある位置に合わせる。



ポイント
4 テープの止め方で
フィット性UP

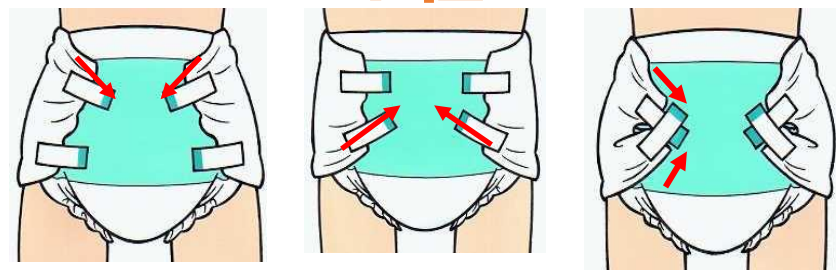

お腹まわり 脚まわり 全体

お腹まわりが細い場合は、上のテープを斜め下向きに。
脚まわりが細い場合は、下のテープを斜め上向きに。
下のテープ、上のテープの順にとめましょう。
指1本分くらいウエスト部に余裕がある程度で。


使い方

※尿とりパッドと一緒にお使いください。

テープ式おむつのモレない使い方の手順を確認しましょう(1)

1

テープ式おむつを開き、テープ式の立体ギャザーの内側に、尿とりパッドを入れます。

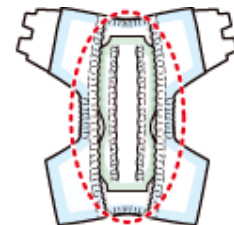

2

使用者の体を横向きにしたら、テープのついている方を背中側にして、体の中央に置きます。おむつのテープ部分が体に当たらないように折り、おむつの中心を使用者の背骨の位置に合わせて、体の下に置きます。

ポイント

1

テープ(上側)が腸骨の位置より上になるように置きます。



3

使用者の体をゆっくりとあお向けに戻します。

尿とりパッドを引き上げ、ズレ止めテープの剥離紙を剥がします。

ポイント

2

尿とりパッドの立体ギャザーを両手で軽く持ち、脚のつけ根に沿うように上げます。



使い方

テープ式おむつのモレない使い方の手順を確認しましょう(2)

4

テープ式おむつの立体ギャザーを脚のつけ根に沿わせるように、おむつの前部を引き上げます。




5

テープ式おむつのシワを伸ばしながら、左右に広げます。
尿とりパッドのズレ止めテープのある部分を上から軽く押さえ、ズレないようにしながら、まず下側のテープを左右順番に止め、次に上側のテープも左右順番に止め、体に合わせます。



ポイント
3

お腹まわりが細い場合は、上のテープを斜め下向きに、
脚まわりが細い場合は、下のテープを斜め上向きに。
体全体が細い場合、上下のテープを交差させて
止めましょう。

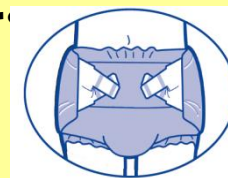

ポイント
4

テープを止めた位置が、左右対称になるように注意しましょう。

6


最後に、指1本分位、ウエスト部分にゆとりがあることを確認します。

使い方

「リリーフ股モレ安心テープ式」をはずす時の注意点を確認しましょう

捨てるときのポイント

排便時は、便だけトイレに流します。小さく丸めて、ゴミ袋などに入れて処理します。

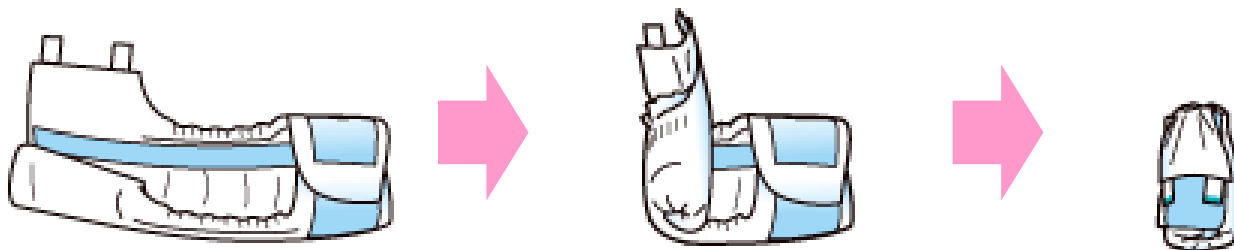

※紙おむつは可燃物ですが、市区町村により廃棄物の分類が異なります。
お住まいの地域の廃棄ルールに従ってください。

参考

多めの便が出たあと、徐々に便量が少なくなってきたら、尿とりパッドをお使いになると経済的です。便が出た後は、なるべく早く交換して、清潔にしましょう。

参考：モレ悩み(テープ式おむつ)

テープ式おむつ使用中の主なモレ原因を確認しましょう

モレがある場合、以下のことが原因として考えられます。ご確認ください。

原因

1

テープ式おむつのサイズがゆるい。

原因

2

テープ式おむつが正しく当たっていない。

(脚まわりが非常に細い、麻痺や拘縮、腰が曲がっている等)

原因

3

テープ式おむつ、尿とりパッドの吸収量が排尿量より少ない。

(尿量が多い)

原因

4

尿とりパッドが、テープ式おむつからはみ出ている。

(フラットタイプを尿とりパッドのように使っていてはみ出ている)

原因

5

テープ式おむつのモレ防止立体ギャザーが倒れている。

原因

6

尿とりパッドの多重使い。(複数枚のパッドを1度に使っている)

原因

7

横向き寝で過ごすことが多い。(特に男性の場合)

特長


リリース 股モレ安心テープ式

不安な股モレを防ぐ徹底ガード構造のテープ式です。

リリースだけ! 3重のモレ対策

尿や軟便を

- ① 内側の立体ギャザーでせき止める!
- ② 脚まわりにも吸収体。たっぷり出たときも安心
- ③ 万が一あふれても脚まわりギャザーがガード!

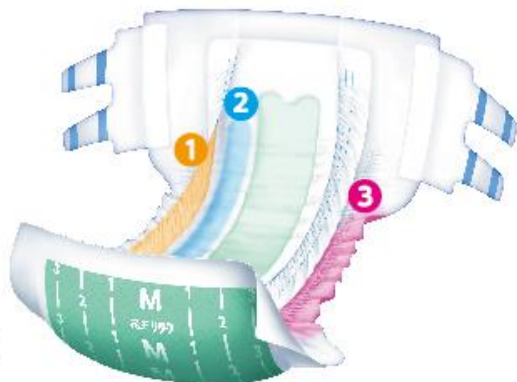

※②はM、Lサイズのみ

排尿5回分吸収

Sサイズは4回分吸収



通気 さらさら通気性シートを採用

肌トラブルの原因となるおむつ内の湿気を外へ逃がします。



抗菌 消臭 銀(Ag)の効果で安心消臭

排泄後、時間とともに増えてしまう雑菌の繁殖を抑えニオイを防ぎます。(銀(Ag)含有の抗菌消臭成分を配合)

【ヒップサイズ】

Sサイズ(16枚位) 55~85cm
Mサイズ(15枚入) 65~105cm
Lサイズ(13枚入) 85~130cm

- 普段、寝て過ごす方に
- テープ式おむつを初めてお使いになる方に
- 横向き寝でのモレが気になる方に

紙おむつの選び方・使い方に関するご相談は
花王・リリースふれあいダイヤル

(料金は無料です) おむつ110番
0120-062110
受付時間: 平日10:00~16:00 (土日・祝日を除く)

排尿・排便後のケア(スキンケア)をおすすめします

尿や便が肌に付いたままの状態が続くと、おしりが赤くなったり、かぶれやすくなりますし、ニオイの原因にもなります。トイレで排便後に、おしりのスキンケアをおすすめします。

- ◆トイレットペーパーや「おしりふき」だけではふき取れない、シワに入りこんだ汚れも力を入れずにキレイにふき取ることが出来ます
 - ◆ふき取り後も、肛門周辺の肌の上に皮脂膜として残って、次の尿・便が肌に付きにくくなります
 - ◆主成分スクワランの効果でペーパーが柔らかくなり、やさしいふき心地になります
 - ◆消炎剤(グアiazレン)が、肛門周辺部のかぶれ・ただれ・股ズレを防ぎます
- ※「泡サニーナ」は、殺菌剤配合

サニーナ 泡サニーナ



医薬部外品

～使い方～



ペーパーにシュツ！

- ①陰部・おしりの洗浄、ふき取り後にトイレットペーパーに数回スプレーします
- ②おしりをやさしくふきます